


GUÍA RÁPIDA

Test rápido para la detección de gluten en muestras de orina

GlutenDetect Urine es una herramienta de uso doméstico que permite la detección de fragmentos de gluten procedentes de la degradación gastrointestinal del gluten, en muestras de orina.
Este kit no es una prueba de diagnóstico.

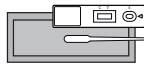


Dispositivo de Flujo Lateral (LFD) - Gluten-Detect Stick (con pipeta de plástico)


Recolector de orina


Guía rápida

RS-6405


Tubo de tapón azul con Solución Acondicionadora
RS-6401


Jeringuilla de plástico desechable

Toma de muestra

- Abra el recolector de orina con cuidado siguiendo la dirección de las flechas y péguelo a la parte de atrás de la tapa del inodoro. En su lugar, puede usar un recipiente limpio (no suministrado) para recoger la orina. 5 ml de orina serán suficientes para realizar un test.
- Es importante evitar el consumo de líquido desde que se sospeche la transgresión hasta que se realice el test, para obtener la máxima sensibilidad. Se recomienda realizar la toma de muestra tras 6-9 horas de la posible transgresión. *(Si el momento de la toma de muestra cae durante la madrugada, recoger la primera orina de la mañana).*
- Si se desconoce el momento de la posible transgresión, se recomienda recoger la primera orina de la mañana o la última de la noche. En caso de sospecha de ingesta/transgresión, tenga en cuenta la siguiente información:




Tiempo máximo de detección desde la ingesta	3 - 15 horas
Tiempo óptimo de detección desde la ingesta*	6 - 9 horas
Cantidad mínima de gluten detectable	50mg

*Para maximizar la probabilidad de detección del kit, se recomienda la toma de muestra tras 6 - 9 horas de la ingesta de gluten.

Procedimiento del test - https://youtu.be/hkmcIT3oZ_w


1

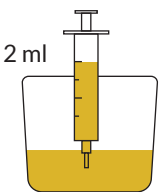

2 ml

Use una jeringuilla desechable (incluida en el kit) y coja 2 ml de orina.


2

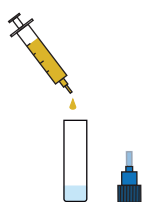

Abra el tubo azul con Solución Acondicionadora y transfiera 2 ml de orina al tubo.

Deseche la jeringuilla una vez usada (no la reutilice con nuevas muestras de orina).


3

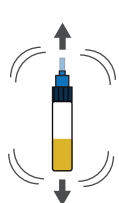

10 s

Cierre bien el tubo de tapón azul y agítelo suavemente durante 10 segundos para mezclar la orina con la Solución Acondicionadora.


4

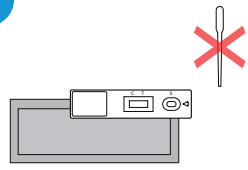

Abra la bolsa protectora y extraiga el dispositivo de prueba y coloque el dispositivo horizontalmente sobre una superficie limpia.


Nota: Descarte la pipeta incluida, no la necesitará.

5

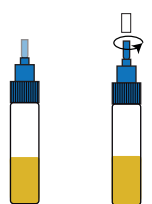

Desenrosque el extremo transparente del tapón del tubo azul con la mezcla de orina y Solución Acondicionadora.

6

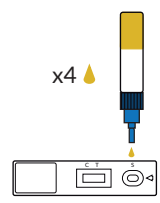

x4

Invierta el tubo cuidadosamente y añada 4 gotas de la mezcla sobre la zona S del dispositivo.

7




15-30 min

Espere un mínimo de 15 y hasta un máximo de 30 minutos antes de leer el resultado del test. No leer el resultado pasados los 30 minutos desde que añadió las gotas al dispositivo de prueba.

No agite ni mueva el dispositivo mientras espera.

Lectura de los resultados


• (-) NEGATIVO

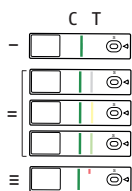

- I. Una única línea de Control **VERDE** aparece en la Zona Control (C). La intensidad de la línea de Control (C) no es relevante.
- II. Si aparece una línea en la Zona del Test (T) de un color diferente al rojo (ej. gris, amarillo, verde) junto con una línea verde en la Zona Control (C).
- III. Si la línea **ROJA** no es completa (ej. aparecen puntos rojos en la zona T) y aparece una línea verde en la Zona Control (C).

No se han detectado fragmentos de gluten en la muestra de orina.


• (+) POSITIVO

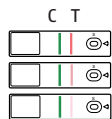

Si es visible una línea **VERDE** en la Zona Control (C) junto a una línea **ROJA** en la Zona del Test (T), independientemente de la intensidad obtenida, el resultado del test es positivo.

Si ha obtenido un resultado positivo, se ha producido una ingesta de gluten con una alta probabilidad entre 3 y 15 horas antes de la realización del test. Revise los alimentos ingeridos para identificar el origen del gluten.

• INVÁLIDO

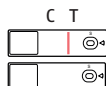

Si no aparece una línea **VERDE** en la Zona Control (C) el test no ha funcionado correctamente y los resultados no son válidos. Revise las instrucciones y repita la prueba con un nuevo test siguiendo cuidadosamente el procedimiento indicado.

Condiciones de almacenamiento

- El producto debe almacenarse en un lugar seco y a una temperatura de 15°C–30°C / 59°F–86°F (temperatura ambiente).
- Para un rendimiento óptimo del test, guarde el producto en su embalaje original y úselo antes de la fecha de caducidad impresa en la etiqueta.

Recomendaciones y precauciones

- Lea detenidamente este manual antes de realizar la prueba, se recomienda seguir estrictamente las instrucciones descritas.
- Use este test solo para el análisis de muestras de orina humanas. Este test no ha sido validado con muestras de orinas de neonatos por lo que no se recomienda su uso en este segmento de la población.
- El test debería realizarse de inmediato después de abrir la bolsa que contiene el dispositivo de prueba
- Siga las recomendaciones descritas en el apartado "Toma de muestra"
- No ingiera ninguna de las soluciones incluidas en el kit.
- Una mala visión, daltonismo o una mala iluminación pueden afectar a la capacidad de interpretar correctamente el test.
- Mantenga este producto fuera del alcance de los niños.
- No emplee ninguno de los materiales del kit pasada la fecha de caducidad.
- No mezcle los componentes de varios kits, ni emplee soluciones diferentes a las suministradas.
- Para evitar la posible contaminación del ensayo por trazas de gluten, lávese bien las manos o utilice guantes sin polvo para manipular el dispositivo. Una vez que se haya retirado de su envoltorio, el dispositivo deberá usarse inmediatamente bajo unas condiciones estrictas de higiene.
- Todos los componentes del test se pueden desechar en la basura doméstica.